

Gigaset

WIDEX

W570 A

You can find the most up-to-date
user guide at
www.gigaset.com/manuals



Gigaset W570 (Widex) – förstklassig trådlös telefon med direktöverföring till Widex hörapparater

Gigaset W570 är en förstklassig trådlös telefon med stora knappar för det fasta nätet som överför telefonsamtal i realtid direkt till Widex hörapparater. Ingen ytterligare extrautrustning behövs. Du hör dina samtalspartners direkt via båda hörapparater och har bästa talförståelse även när du telefonerar. Gigaset W570 utmärker sig genom enkel manövrering och modern design. Den används som en helt vanlig telefon och fungerar även utan hörapparater utan att den behöver ställas om.

Egenskaper

- Avspända samtal med bästa talförståelse tack vare direkt överföring av telefonsamtal (utan extrautrustning) till båda hörapparaterna samtidigt.
- Automatisk koppling via en AutoConnect-funktion. Telefonen upprättar automatiskt en trådlös anslutning till hörapparaterna så snart den befinner sig i närheten av dem. Därvid används den strömsparande WidexLink-radiotekniken. Hörapparaternas batterier utsätts inte för någon extra belastning.
- Överföring i realtid. När du tar emot ett samtal kan du börja prata direkt.
- Kompatibel med alla Widex hörapparater som bygger på E-chip-plattformen EVOKE (eller senare) och använder WidexLink-tekniken.
- Förstklassig trådlös telefon med stora knappar som även kan användas av familjemedlemmar eller gäster med normal hörsel. På så sätt behövs ingen ytterligare telefon i familjen.
- Omfattande funktioner hos basstationen, t.ex.:
 - Minnesutrymme för upp till 150 telefonnummer
 - Högtalare med volymreglering
 - SOS-funktion
- Räckvidd upp till 300 meter från basstationen beroende på omgivning.

Användning

Parkoppla telefon och Widex hörapparater

- ▶ Håll handenheten intill någon av hörapparaterna. Telefonen ansluts automatiskt till hörapparaterna.

Avaktivera parkoppling

- ▶ Flytta telefonen utanför hörapparaternas räckvidd.

Ändra volymen

Om ljudöverföringen eller WidexLink-överföringen är för låg eller för hög kan du justera ljudvolymen.

- ▶ Tryck på volymknapparna till höger på handenheten: upptill **[+]**: högre / nedtill **[-]**: lägre.

I övrigt fungerar telefonen enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen.

Översikt

Handenhet



- 1 **Direktvalsknapp A** (→ s. 12)
(SOS-knapp, → s. 25)
Lyser: SOS-funktionen är aktiverad
Blinkar: SOS-samtal startat
- 2 **Direktvalsknappar B till D** (→ s. 12)
- 3 **Meddelandeknapp** (→ s. 21)
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor
blinkar: nytt meddelande eller nytt missat samtal

- 4 **Displayknappar** (→ s. 13)
Olika funktioner, beroende på användningssituation
- 5 **Svaraknapp**
Besvara samtal, ringa upp det visade numret, öppna återuppringningslistan
Blinkar: Besvara ett samtal
- 6 **Styrknapp** (→ s. 11)
Öppna menyer, navigera i menyer och inmatningsfält, använda funktioner (situationsberoende)
- 7 **Knapp 1**
Ring upp nättelefonvararen (→ s. 28)
- 8 **Stjärnaknappen**
Ringsignaler på/av (lång tryckning) (→ s. 39)
- 9 **Ficklampa och signalljus (LED)** (→ s. 33)
- 10 **Volymknappar**
för ringsignal, lur/headset, högtalare
Övre knapp: Inställning av extra högt ljud under samtal (→ s. 18)
- 11 **Högtalarknapp** (→ s. 17)
Omkoppling mellan lur och högtalare, besvara samtal, ringa upp visat nummer
Lyser: Högtalare aktiverad
- 12 **Avsluta-, på/av-knapp**
Avsluta ett samtal, Avbryta en funktion
En menynivå bakåt (kort tryckning), tillbaka till viloläge (lång tryckning), Stänga av handenhet (i viloläge (lång tryckning);
- 13 **Fyrkantknappen**
Knappläs på/av (lång tryckning, → s. 11);
Skriva med versaler, gemener och siffror (→ s. 15)
- 14 **R-knapp**
Förfrågan (flash): lång tryckning
- 15 **Mikrofon**



Ändra displayspråk: → s. 37

Basstation Gigaset W570



Registrerings-/sökningssknapp

- **Kort tryckning:** Söka handenheter ("sökning") → s. 36.
- **Lång tryckning:** Registrera handenheter och DECT-enheter → s. 35.





Innehåll

Översikt	2
Handenhet	2
Basstation Gigaset W570	3
Beskrivning i bruksanvisningen	5
Säkerhetsanvisningar	6
Börja använda telefonen	7
Ansluta basstationen	7
Använda telefonen	11
Lära känna telefonen	11
Telefona	16
Listor	19
Telefonbok	22
SOS-funktion	25
Aktivera nättelefonsvararen	28
Ytterligare funktioner	29
ECO DECT	29
Använda handenheten som väckarklocka	30
Rumsövervakning	31
Snabbuppringning	32
Ficklampa	33
Skydd mot oönskade samtal	33
Använda flera handenheter	35
Ställa in telefonen	37
Ställa in handenheten	37
Ställa in basstation	41
Använda basstationen i en telefonväxel	42
Bilaga	43
Kundservice & assistans	43
Upplysningar från tillverkaren	46
Tekniska data	48
Index	51




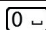
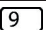







Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen finns inte i alla länder och hos alla operatörer.

Beskrivning i bruksanvisningen

	Varningar som kan leda till personskador eller saksador om de inte följs.
	Viktig information om funktioner och korrekt hantering, eller funktioner som kan leda till kostnader.
	En förutsättning för att kunna utföra följande åtgärd.
	Annan användbar information.



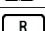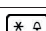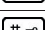



Knappar

	Svaraknapp		Högtalarknapp
	Avslutaknapp	 till 	Siffer-/bokstavsknappar
	Styrknapp kant/mitt		Meddelandeknapp
	R-knapp		Stjärnknappen
	Fyrkantknappen		
OK, Tillb. ...		Displayknappar	













Tillvägagångssätt

Exempel: Aktivera/avaktivera autosvar:

▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶ Auto. svar ▶ OK ( = på)

Steg	Du måste göra följande
▶ Meny	Tryck på handenhetsens styrknapp Meny i viloläge. Huvudmenyn öppnas.
▶  ▶ OK	Navigera med styrknappen  till posten Inställningar . Bekräfta med OK . Undermenyn Inställningar öppnas.
▶  Telefoni ▶ OK	Med styrknappen  väljer du posten Telefoni . Bekräfta med OK . Undermenyn Telefoni öppnas.
▶ Auto. svar	Funktionen för aktivering/avaktivering av autosvar visas som första meny punkt.
▶ OK	Aktivera eller avaktivera med OK . Funktionen är aktiverad  /avaktiverad  .

Säkerhetsanvisningar

	Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.
	Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer. Om LAN- eller internetanslutningen bryts går det inte att använda vissa funktioner som kräver internetanslutning, såsom internettelefoni (VoIP), onlinetelefonböcker eller infocenter. Om telefonen är ansluten till det fasta nätet kan du ringa och ta emot samtal. När knapp-displayläset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.
	Använd enbart laddningsbara batterier enligt specifikationen (se lista över godkända batterier → www.gigaset.com/service) eftersom allvarliga hälsorisker och personsador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.
	Handenheten får bara användas när batterilocket är stängt.
	Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.
	Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.
	Använd endast den nätadapter som anges på enheterna. Under laddning måste vägguttaget vara lätt att komma åt. Använd endast de medföljande kablarna för att ansluta till fast nät och LAN och anslut dessa endast till de avsedda uttagen.
	Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.
	Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Trasigt glas- eller plastmaterial kan skada händer och ansikte. Lämna in enheten till reparationservice.
	Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning. Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.
	Förvara små knappceller och batterier som kan sväljas utom räckhåll för barn. Svalda batterier kan leda till brännskador, perforering av mjukdelar eller till döden. Allvarliga brännskador kan uppträda inom 2 timmar efter sväljning. Kontakta omedelbart läkare om en knappcell eller ett batteri råkar sväljas.
	Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning. Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Teknisk information").

Börja använda telefonen

Förpackningens innehåll

- en basstation Gigaset W570
- en Gigaset handenhet Gigaset W570H
- två batterier
- ett batterilock
- en nätadapter till basstationen
- en telefonkabel RJ11-RJ11 (t.ex. för anslutning till ett telefonuttag på routern)
- en bruksanvisning

Om du har köpt en **variant med flera handenheter** ingår följande för varje handenhet:

- två batterier
- ett batterilock
- en laddare till basstationen
- en nätadapter



Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.


I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och ytbehandlingar som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.

Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.

Skydda telefonen från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

Ansluta basstationen


- ▶ **Först** ansluter du telefonkontakten **1** och placerar kablarna i kabelkanalerna.
- ▶ **Sedan** ansluter du nätkontakten **2**.

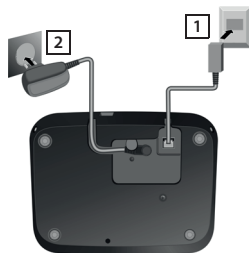

Ansluta basstationen


Alternativ: Ansluta basstationen till en router

- ▶ Koppla samman enhetens telefonanslutning **1** och routerns telefonanslutning **2** med den medföljande telefonkabeln.

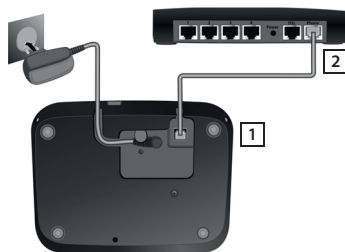


Efter anslutning eller återställning av basstationen är telefonsvararen klar att användas först **efter ca 15 sekunder**.

Ansluta laddaren (om sådan medföljer)

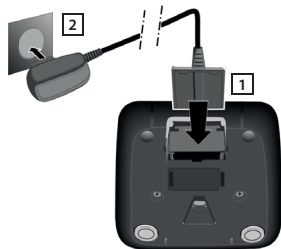

- ▶ Anslut nätadaptersnans platta kontakt **1**.
- ▶ Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

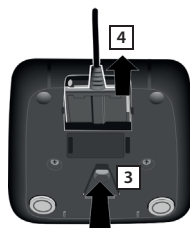

Dra ut stickkontakten från laddaren igen:

- ▶ Skilj nätadaptersnans från elnätet.
- ▶ Tryck på upplåsningsknappen **3**.
- ▶ Dra ur kontakten **4**.

Börja använda handenheten

Displayen skyddas av en plastfolie. Dra av skyddsfolien!

Sätta i batteriet och stänga batterifacket



Använd endast uppladdningsbara batterier, eftersom vi annars inte kan utesluta allvarliga saksador eller hälsorisker. T.ex. kan batteriernas hölje förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan det uppstå funktionsstörningar eller skador på enheten.



- ▶ Sätt in batteriet (rätt riktning +/- se bild).




- ▶ Sätt på locket ovanifrån **1**.
- ▶ Skjut sedan batterilocket tills det snäpper på plats **2**.



- Öppna batterilocket:
- ▶ Skjut locket nedåt **3**.

Ladda batterierna

- ▶ Ladda batterierna helt i laddaren/basstationen före första användning.

Batteriet är fullständigt laddat när blixtsymbolen  på skärmen slocknar.



Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.


Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden.

Levererade handenheter är som regel redan registrerade på basstationen. Om en handenhet trots allt inte är registrerad på handenheten (på displayen visas **Var god registrera**) registrerar du handenheten manuellt (→ s. 35).

Ställa in språk

Displayspråk

Vid första användning får du frågas på engelska om vilket språk du vill använda på displayen.

- ▶ ... Välj önskat språk med  ▶ OK

Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.

► Tryck på displayknappen under indikeringen **Tid**. Inmatningsfältet öppnas.

► Ange dag, månad och år med 8 siffror via knappsatsen, t.ex.

för 1 april 2019. ► **OK**

Korrigerig: Tryck på styrknappens vänstra eller högra kant  för att växla mellan fälten.

► Ange timmar och minuter med 4 siffror via knappsatsen. för klockan 07:15. Växla mellan fälten med styrknappen. ► **OK**

Sparat visas på displayen. Du hör en bekräftelsesignal.

Återgå till viloläge: ► Tryck **länge** på avslutaknappen .

Använda telefonen

Lära känna telefonen

Stänga av/sätta på handenheten



Tryck **länge** på avslutaknappen.

Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen.



Tryck **länge** på fyrkantknappen i viloläge (bekräftelsesignal). Knapplåset aktiveras eller avaktiveras. När det är aktiverat visas symbolen  på displayen.

Om knapplåset är aktiverat visas ett meddelande om det när du trycker på en knapp.

Knapplåset avaktiveras automatiskt när du får ett samtal. När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.





När knapplåset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.

SOS-knappen fungerar även när knapplåset är aktiverat (→ s. 25).

Styrknapp



Med styrknappen navigerar du i menyer och mellan inmatningsfält. I vissa situationer använder du den för att öppna specifika funktioner.

I det följande är den sida av styrknappen du ska trycka på svartmarkerad (upptill, nedtill, till höger, till vänster) i respektive användningssituation, t.ex.  för "tryck till höger på styrknappen" eller  för "tryck på mitten av styrknappen".

I viloläge

Öppna telefonboken

Öppna huvudmenyn

Öppna listan med handenheter

I undermenyer, urvalsfält och inmatningsfält

Bekräfta funktion

Under ett samtal

Öppna telefonboken

Stänga av ljudet för mikrofonen



Starta intern förfrågan




Volymknappar

Ställ in volymen för **lur/headset** eller **högtalare** under ett samtal eller för **ringsignalen** vid ett inkommande samtal (5 steg).


- ▶ Tryck på volymknapparna till höger på handenhetsen:

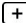 (högre) /  (lägre)

Den aktuella inställningen sparas efter ca två sekunder (→ s. 38).

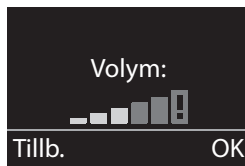

Extra högt ljud-funktion

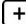- ▶ Tryck flera gånger på den övre volymknappen  tills du når den högsta nivån.




Det extra höga ljudet gäller endast under det aktuella samtalet.



- Denna inställning kan ge hälsoproblem hos personer med normal hörsel och är endast avsedd för personer med nedsatt hörsel.
- Funktionen kan förstärka störande ljud från telefonledningen.

Direktvalsknappar A till D


Du kan koppla särskilt viktiga nummer som du ringer ofta till de fyra **direktvalsknapparna**. Du kan tilldela ett **externt telefonnummer** till varje direktnummerknapp eller en **intern anknytning**.

Du ringer det sparade numret genom att trycka på motsvarande direktvalsknapp  till . En **direktvalsknapp**  kan även tilldelas SOS-funktionen (→ s. 25).

Tilldela en funktion till direktvalsknappar

Förutsättning: Ingen funktion är ännu tilldelad direktvalsknappen i fråga.

- ▶ Tryck i viloläge på den direktvalsknapp ( till ) på handenhetsen som du vill tilldela en funktion.

Välj önskad funktion 

- ▶ **Extern nummer**

Ange ett externt telefonnummer direkt.



Ange nummer och tryck på **OK**.



Ange namn och tryck på **OK**.

- ▶ **Aktivera internsamt.**

Direktval till en handenhet som är registrerad på samma basstation.

Om fler än en handenhet är registrerad: ▶  Välj handenhet ▶ **OK**

- ▶ **Int. allanrop**

Direktval till alla handenheter som är registrerade på samma basstation.

► Num. från telefonbok

Allokera ett nummer från telefonboken till knappen.
Telefonboken öppnas. Välj nummer och tryck på **OK**.

Ändra direktvalsknapparnas funktion

► **Meny** ► **Inställningar** ► **OK** ► **Snabbvalsknappar** ► **OK** ► Välj direktvalsknapp (A till D)

Efter knappens nummer visas aktuell allokering, t.ex.

► **A: <Ingen post>**: knappen har ännu ingen allokering

Du kan nu ändra allokeringen.

Välj en ny funktion med **Meny** ► Beroende på den aktuella allokeringen kan det hända att inte alla funktioner är tillgängliga. Om det redan finns en post måste den först raderas.

► **Radera post**: Ta bort knappens aktuella allokering

► **Ändra post**: Ändra telefonnummer och/eller namn




Endast knapp : Allokera SOS-funktionen till knappen → s. 26

Displayknappar

Displayknapparnas funktioner skiftar beroende på användningssituation. **Exempel:**

- 1 Displayknapparnas aktuella funktioner
- 2 Displayknappar

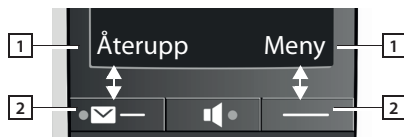

Exempel:

Återupp	Öppna återuppringningslistan.
Meny	Öppna huvudmenyn/en situationsberoende meny.
OK	Bekräfta val eller spara inmatning.
	Missade samtal eller meddelanden på nättelefonsvaren (→ s. 21).
Radera	Raderingsknapp:: Radera tecken-/ordvis från höger till vänster.
Tillb.	Gå tillbaka en meny nivå resp. avbryta process.
Mikr. av.	Stäng av mikrofonens ljud (→ s. 18).

Displaysymboler

	Åtgärd genomförd		Åtgärd misslyckades
	Information		Väckning (→ s. 30)
	Vänta...		Display upp/ner

Menystyrning


Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer.


Huvudmeny (första menynivån)


- ▶ Öppna huvudmenyn genom att trycka på displayknappen **Meny** när handenheten är i viloläge.

Funktionerna i huvudmenyn visas med namn och symbol på displayen.

Välj en funktion:

- ▶ Du bläddrar från en funktion till en annan genom att trycka på styrknappen . Den valbara funktionen visas på displayen.
- ▶ Välj den visade funktionen genom att trycka på displayknappen **OK**. Den tillhörande undermenyn öppnas och den första posten i menyn visas.

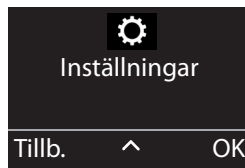


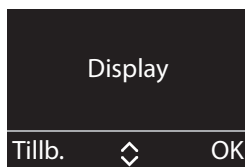
Om du trycker på displayknappen **Tillb.** eller **kort** på avslutaknappen  återgår displayen till viloläge.


Undermenyer

Funktionerna i undermenyn visas som beteckning.

Välj en funktion:


- ▶ Du bläddrar från en funktion till en annan genom att trycka på styrknappen . Den aktuella funktionen visas på displayen.
- ▶ Välj den visade funktionen genom att trycka på displayknappen **OK**. Den tillhörande undermenyn öppnas och den första posten i menyn visas.




Om du trycker på displayknappen **Tillb.** eller på avslutaknappen  **kort** kommer du tillbaka till föregående menynivå.

Tillbaka till viloläge





Från ett valfritt ställe i menyn:

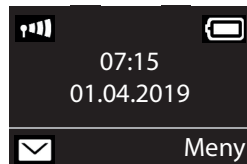- ▶ Tryck **länge** på avslutaknappen  eller
- ▶ Tryck inte på någon knapp: Efter 2 minuter försätts displayen **automatiskt** i viloläge.



Skriva och redigera namn

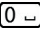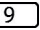Följande regler gäller när du skriver namn:

- Varje knapp mellan  och  är tilldelad flera bokstäver och tecken.
- Skrivmarkören (cursor) styrs med  .
- Tecknen infogas vid markören.
- Tryck på displayknappen **Radera** för att radera tecknet till vänster med markören.
- Den första bokstaven i namnet skrivs automatiskt med versal och de övriga med gemener.



De tecken som är tilldelade till knappen visas i en urvalsrad till vänster nedtill på displayen. Det valda tecknet är markerat.

- ▶ Tryck flera gånger **kort** på knappen för att gå till önskad bokstav eller önskat tecken.

Ställa in skrift med versaler, gemener eller siffror

Du växlar läge för textinmatning genom att trycka upprepade gånger på fyrkantknappen .

- 1 Skriver med siffror
- A Skriver med versaler; första bokstaven med versal, alla övriga med gemener
- a Skriver med gemener

Lägesbytet visas mitt på displayen.

Korrigerar felinmatningar

Du korrigerar felaktiga tecken i inmatningsfältet genom att gå till den felaktiga inmatningen med styrknappen . Då kan du:

- med displayknappen **Radera** radera tecknet till vänster med markören.
- Infoga tecken vid markören.
- Skriver över det markerade (blinkande) tecknet, t.ex. vid inmatning av tid och datum.

Telefonera

Om du trycker på en knapp när displaybelysningen är avstängd tänds den.

Ringa externt

Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.

▶  ange ett nummer ▶ tryck **kort** på knappen Svara 

eller

▶ tryck på svaraknappen  **länge** ▶ ... ange ett nummer med 



Ringa upp telefonnumret:

- med direktnummerknapp → s. 12
- från telefonboken → s. 22
- från listan över missade samtal → s. 21
- från återuppringningslistan → s. 19



Avsluta samtal/avbryta uppringning

▶ Tryck på avslutaknappen  eller placera handenheten i basstationen eller laddaren.

Besvara samtal

Ett inkommande samtal signaleras på tre sätt i handenheten: med ringning, en indikering på displayen och genom att svaraknappen  blinkar. Signallampan på handenhetens baksida blinkar om funktionen **LED-signal** är aktiverad (→ s. 39).

Du kan besvara samtalet på följande sätt:

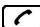- ▶ Tryck på svaraknappen .
- ▶ Tryck på högtalarknappen .
- ▶ Tryck på displayknappen **Svara**.

Stänga av ringsignalen:

▶ Tryck på displayknappen **Tyst**. Du kan svara på samtalet så länge som det visas på displayen.



Om handenheten står i basstationen och funktionen **Auto. svar** är aktiverad (→ s. 38) tar handenheten automatiskt emot ett samtal när du lyfter upp den från basstationen.

Nummerpresentation

Vid ett samtal visas uppringarens nummer på displayen om följande förutsättningar är uppfyllda:

- Din nätoperatör har stöd för CLIP, CLI.
 - CLI, Calling Line Identification Numret för personen som ringer överförs.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Numret för personen som ringer visas.
- Du har begärt CLIP hos din nätoperatör.
- Den som ringer har begärt CLI hos sin operatör.


Samtalsvisning

Vid ett samtal visas telefonnumret på displayen.

Om numret till den som ringer är sparad i din telefonbok visas istället motsvarande telefonbokspost.

Istället för numret visas följande:

- **Externt**, om inget nummer överförs.
- **Okänd**, om den som ringer undertrycker nummerpresentation.
- **Okänd**, om den som ringer inte har aktiverat nummerpresentation.

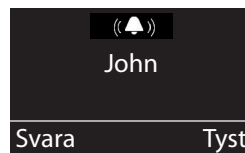

Ringsignalen kan stängas av för anonyma samtal (samtal med undertryckt nummerpresentation) (→ s. 34).

Högtalarfunktion

Med högtalarfunktionen aktiverar du högtalaren, så att du kan höra den du talar med utan att behöva hålla handenheten mot örat. På så sätt har du båda händerna fria och även andra personer kan lyssna.



Om du låter någon annan lyssna på telefonsamtalet ska du tala om det för din samtalspartner.

Aktivera/avaktivera högtalarfunktionen

Aktivera vid uppringning



Ange ett nummer och tryck på högtalarknappen.

Växla mellan lur- och högtalarläge



Tryck på högtalarknappen.

Under ett samtal aktiverar eller avaktiverar du högtalarfunktionen.

Om du vill ställa handenheten i laddaren under pågående samtal:

- ▶ Håll högtalarknappen  intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare två sekunder. I annat fall bryts samtalet.




Ändra samtalsvolymen, → s. 38.

Sekretess

Du kan avaktivera handenhetsens mikrofon under ett pågående samtal.

Mikr. av. Tryck på displayknappen för att stänga av handenhetsens mikrofon.

På Tryck på displayknappen för att aktivera mikrofonen igen.

 Tryck på styrknappen (höger) om du vill aktivera/avaktivera mikrofonen.

Ändra volymen under ett samtal

Volymen ändras för det aktuella läget (högtalare, lur).




▶ Tryck på volymknapparna till höger på handenhetsen: upptill : högre / nedtill : lägre.

Den här inställningen sparas (→ s. 38).

Extra högt ljud-funktion: → s. 12

Ringa interna samtal



Interna samtal är kostnadsfria samtal mellan handenheter som är registrerade på samma basstation.

▶  (kort tryckning). **Allanr.** visas. ▶  välj handenhet från listan (den egna handenhetsen är markerad med <) eller **Allanr.** (samlingsval) ▶ 

Lång tryckning på  ringer genast upp **alla** registrerade handenheter.

Besvara internsamtal

Din telefon ringer, på displayen visas det interna numret till den uppringande deltagaren (t.ex. **INT 2**) resp. det angivna namnet.

▶ Tryck på svara- eller högtalarknappen   på handenhetsen för att besvara samtalet.

Avsluta ett samtal


▶ Tryck på avslutaknappen  på handenhetsen .




Ändra handenhetsens namn: → s. 40

Koppla vidare ett samtal till en annan handenhet/intern förfrågan

Vidarekoppla externt samtal internt:

- ▶  ▶ Listan med handenheter öppnas. ▶ Om fler än en handenhet är registrerad på basstationen väljer du en handenhet eller **Allanr.** ▶  eller **OK**.

Överföra externt samtal: Du har två möjligheter att överföra samtalet:

- ▶ Du väntar tills den uppringda personen svarar och lägger sedan på:
Tryck på avslutaknappen .



eller:

- ▶ Lägg på luren innan personen svarar: Tryck på avslutaknappen .

Om den uppringda personen inte svarar eller inte övertar samtalet avslutar du förfrågan med **Tillb.**

Svara på väntande samtal

Om du tar emot ytterligare ett **internt** samtal under ett pågående **externt** samtal hör du signalen för väntande samtal (kort signal). Vid nummerpresentation visas numret på den som ringer på displayen.




- ▶ Tryck på avslutaknappen  på handenheten för att avsluta det interna samtalet.
- ▶ Tryck på svaraknappen  på handenheten för att ta det externa samtalet.

Listor

Återuppringningslista

I återuppringningslistan finns de tio senast uppringda telefonnumren för den aktuella handenheten (max. 30 siffror). Om numren finns i telefonboken visas det tillhörande namnet.

Ringa från återuppringningslistan

-  Tryck på svaraknappen.
-  Välj post.
-  Tryck på svaraknappen. Numret rings upp.

Hantera posterna i återuppringningslistan

 Tryck på svaraknappen.

 Välj post.

Meny Tryck på displayknappen.

Du kan välja följande funktioner med :

- ▶ **Använd nummer**
- ▶ **Kopiera till telefonbok** Kopiera numret på den som ringer till telefonboken:
- ▶ **Radera post** Radera vald post.
- ▶ **Radera lista** Radera **alla** telefonboksposter.

Nättelefonsvararlista

Du kan lyssna på meddelanden på nättelefonsvararen via den här listan (→ s. 28).

Lista över missade samtal

Förutsättning: CLIP (→ s. 17)

Telefonen sparar de senaste 25 missade samtalen.

Öppna listan med missade samtal

- ▶   Missade samt.

Listan visas på följande sätt:

Antalet nya meddelanden + antalet gamla, avlyssnade meddelanden.

OK Tryck på displayknappen för att öppna listan.

De senaste missade samtalet visas som första post.

Exempel på en listpost:

- Postens status

Nya samt.: nytt missat samtal

Gml Samtal: redan läst post

- Uppringarens nummer eller namn

Du kan spara uppringarens nummer till telefonboken (→ s. 24).

Missade samt.:	01+02
Tillb.	OK

Nya samt.	123456
Tillb.	Meny

Menyfunktioner

Tryck på displayknappen **Meny** för att välja följande funktioner:


- ▶ **Radera post** Radera vald post.
- ▶ **Kopiera till telefonbok** Kopiera numret på den som ringer till telefonboken:
- ▶ **Tidpunkt** Visa datum och tid för samtalet.
- ▶ **Visa nummer** Visa den uppringande partens telefonnummer.
- ▶ **Radera lista** Radera alla poster i listan.

När du stänger lista får alla poster status "gammal".

Välja listan med missade samtal

Öppna listan:  ▶  Missade samt.

 Välj post.

 Tryck på svaraknappen. Numret rings upp.

Visa CNIP-information

Om du har beställt CNIP kan du visa namn och ort som registrerats hos din nätoperatör för detta telefonnummer.

Du har valt en listpost.

- ▶ **Meny** ▶ **Visa namn**

Om namn och ort inte visas har den som ringer inte beställt nummerpresentation eller så undertrycks nummerpresentation.

OK Tryck på displayknappen för att komma tillbaka till listan.

Radera alla poster


Varning! Alla gamla och nya poster raderas

Öppna listan:  ▶  Missade samt.

- ▶ **Meny** ▶  Radera lista ▶ **OK**

Öppna listor med nytt meddelanden

Meddelanden om missade samtal och meddelanden på nättelefonsvararen sparas i meddelandelistor.



Om det finns **meddelanden** trycker du på displayknappen  för att öppna


- nättelefonsvararen (om din operatör har stöd för funktionen och numret till nättelefonsvararen är inmatat → s. 28),
- listan över missade samtal.

När det kommer ett **nytt meddelande på telefonsvararen** hörs en signal. Dessutom blinkar meddelandeknappen .

Telefonbok

I viloläge visas symbolerna för meddelandetyp och antalet nya meddelanden. Antalet **nya** poster visas intill respektive symbol.

- Symbol Nytt meddelande...
-  ... på nättelefonsvararen
-  ... i listan **Missade samtal**

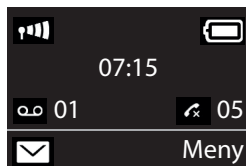

Visa meddelanden


Telefonsvarare

- ▶ Tryck på meddelandeknappen  ▶  Telefonsv. ▶ OK ▶  Välj telefonsvarare (Nät-TS) ▶ OK ...

Numret till nättelefonsvararen rings upp (ytterligare information → s. 28)

missade samtal

- ▶ Tryck på meddelandeknappen  ▶  **Missade samt.** ... missade samtal visas i en lista (ytterligare information → s. 20)

 Nya samtal på nättelefonsvararen visas bara korrekt om din operatör överför den här informationen (se nätoperatörens bruksanvisning till nättelefonsvararen).

Telefonbok

Du skapar en telefonbok till handenheten individuellt. I telefonboken sparar du nummer och tillhörande namn.

Öppna telefonboken


I viloläge: ▶ Tryck på styrknappen 

Längd på en post



Nummer: max. 30 siffror


Namn: max. 16 tecken

Spara första numret i telefonboken

- ▶  ▶ Tfnbok tom Ny post? ▶ OK ▶  (ange nummer) ▶ OK ▶  (ange namn) ▶ OK

Spara ytterligare nummer i telefonboken

- ▶  ▶ Meny ▶  Ny post ▶ OK ▶  (ange nummer) ▶ OK ▶  (ange namn) ▶ OK

 I teckentabellen framgår hur du anger namn (→ s. 50).


Sorteringsordning för telefonboksposter

Posterna i telefonboken sorteras i alfabetisk ordning. Blanksteg och siffror kommer först. Sorteringsordningen är följande:



- 1 Blanksteg
- 2 Siffror (0–9)
- 3 Bokstäver (alfabetiskt)
- 4 Övriga tecken

Om du vill kringgå den alfabetiska ordningen kan du lägga till ett blanksteg eller en siffra före namnet. Dessa poster hamnar då först i telefonboken.




Välja telefonbokspost

 Öppna telefonboken.

Du har följande alternativ:

- Bläddra till posten med  tills önskat namn markerats.
- Ange den första bokstaven i namnet och bläddra vid behov till posten med .

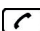


Ringa från telefonboken

▶  ▶  (välj post) ▶ 

Hantera telefonboksposter

Du har valt en post.

Ändra post

▶ Meny ▶  Ändra post ▶ OK ▶  (ändra ev. numret) ▶ OK ▶  (ändra ev. namnet) ▶ OK

Använda ytterligare funktioner

Du kan använda följande funktioner med Meny ▶ .

- ▶ **Visa nummer**
Visa nummer.
- ▶ **Radera post**
Radera vald post.
- ▶ **Skicka post**
Skicka en post till en annan enhet (→ s. 24).
- ▶ **Radera lista**
Radera **alla** telefonboksposter.
- ▶ **Skicka lista**
Skicka fullständig lista till en annan enhet (→ s. 24).

Kopiera telefonboken till en annan handenhet

Du kan överföra alla eller enstaka poster till andra handenheter (→ s. 24). Det är även möjligt att överföra från gamla handenheter om de är registrerade på (den nya) basstationen.

Du kan överföra telefonboksposter från andra handenheter till ni nya handenhet – även poster från gamla handenheter.



Både mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.

Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

- ▶ ▶ (Välj post) ▶ **Meny** ▶ **Skicka post / Skicka lista** ▶ **OK** ▶ (Ange internt nummer till den mottagande handenheten) ▶ **OK**

När överföringen är klar bekräftas det med ett meddelande och en bekräftelsesignal på den mottagande handenheten.

Kopiera nummer till telefonboken

Du kan kopiera nummer till telefonboken som finns i en lista, t.ex. samtalslistan eller återuppringslistan.

Ett nummer visas.

- ▶ **Meny** ▶ **Kopiera till telefonbok** ▶ **OK**
▶ Komplettera posten (→ s. 22).

SOS-funktion

Din handenhet är utrustad med fyra extra knappar (direktvalsknappar **A** till **D**).

Direktvalsknapp A kan tilldelas en särskild SOS-funktion (SOS-knapp). I ett nödläge kan du tillkalla vänner eller grannar genom att trycka på den.



SOS-funktionen måste först ställas in (→ s. 26)



När SOS-funktionen är aktiverad lyser SOS-knappen på handenheten varaktigt.

Förlopp

Ringa nödsamtal

► På **handenheten**: ► Tryck på direktvalsknappen **A**.

Mottagaren av nödsamtalet hör nödsamtalstexten:

- "This is an emergency call." (Detta är ett nödsamtal.)
- "To accept the call please press key 5." (Om du vill ta emot nödsamtalet, tryck på knappen 5.)

Om den uppringda personen trycker på knappen 5 kan ni prata med varandra.

Om den uppringda personen inte svarar **ringer SOS-funktionen automatiskt nästa SOS-nummer efter 60 sekunder** (om du har sparat flera nummer). SOS-funktionen växlar dessutom automatiskt vidare till nästa SOS-nummer efter 60 sekunder i följande situationer:

- Telefonsvararen är aktiverad för det uppringda SOS-numret.
- SOS-numret är upptaget.
- Mottagarens telefon är inte inställd på tonval.

Detta förlopp upprepas maximalt fem gånger. Om inget av samtalen har besvarats avslutas SOS-funktionen med en felsignal.



SOS-knappen på handenheten blinkar under hela proceduren. Texten "Sending emergency call" (Nödsamtal skickas) visas på displayen



Mottagarnas telefoner måste vara inställda på tonval, annars kan de inte bekräfta SOS-samtalet med knappen 5.

Ställa in SOS-funktionen

För att kunna använda funktionen måste du

- spara SOS-numren
- aktivera SOS-funktionen.



Du får inte lägga in nummer till polis, räddningstjänst eller brandkår som nödsamtalsnummer.

Första inställning av SOS-funktionen



Om du redan har tilldelat direktval till knappen **A** måste du först radera detta nummer (→ s. 12). Sedan kan du spara SOS-numret på direktvalsknappen **A**.

▶ Tryck på direktvalsknappen **A** på handenheten i viloläge.

▶ **Aktivera nödfunktion** ▶ **OK** (☑ = aktiverad)

Ange måltelefonnummer: ▶ **Ange nummer** ▶ **OK** ▶ **Ange namn** ▶ **OK**

Du kan ange ytterligare tre nummer:

▶ **Fler nummer?**

Bekräfta med **Ja** om du vill ange ytterligare SOS-nummer och ange dem. Bekräfta med **Nej** om du inte vill ange ytterligare SOS-nummer.

Sparat visas på displayen.

SOS-funktionen är nu inställd och aktiveras automatiskt.

Dina SOS-nummer:



1	
2	
3	
4	







- Om telefonen är ansluten till en telefonväxel måste du ev. ange växelprefix som första siffra i inmatningen (→ telefonväxels bruksanvisning).
- Kontrollera att SOS-funktionen är rätt inställd med ett testsamtal.

Ändra SOS-nummer

▶ **Meny** ▶ **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Nödfunktion** ▶ **OK** ▶ **Nödnummer** ▶ **OK** ▶ **(Välj post 1 till 4)** ▶ **Meny** ▶ **Ändra post** ▶ **OK**

Ange nummer och namn enligt beskrivningen ovan.

Radera SOS-nummer

- Meny ►  Inställningar ► OK ►  Nödfunktion ► OK ►  Nödnummer ► OK ►  (Välj post 1 till 4) ► Meny ►  Radera post ► OK


Posten är raderad.


Aktivera/avaktivera SOS-funktionen

- Meny ►  Inställningar ► OK ►  Nödfunktion ► OK ►  Aktivering ► OK  (= på) ... Knappen  lyser





Tänk på att handenhetens standbytid minskar när SOS-funktionen är aktiverad.

Om **Ekoläge +** (→ s. 29) är aktiverat visas inte anslutningen till basstationen på handenheten. SOS-knappen  fortsätter att lysa även om det inte finns någon anslutning till basenheten.

Du kan kontrollera om basen är nåbar genom att trycka  länge på svaraknappen. Om det går att nå basstationen hör du en kopplingston.

Ringa nödsamtal

 Minst ett SOS-nummer är sparad (→ s. 26) och SOS-funktionen är aktiverad (knappen  lyser) (→ s. 27).

- Tryck på direktvalsknappen  på handenheten. Nödsamtalet inleds.



Nödsamtalet avbryter alla aktiva samtal på basstationen.

Om du har **utlöst nödsamtalet av misstag** avbryter du genom att trycka på avslutaknappen .

SOS-knappen fungerar även när knapplåset är aktiverat.

Aktivera nättelefonsvarearen

Nättelefonsvarearen är den telefonsvareare som din operatör tillhandahåller via telefonnätet. Vid behov får du mer information från operatören.



Du kan bara använda nättelefonsvarearen om du har **beställt** tjänsten från din operatör.

Ange numret till nättelefonsvarearen

För att kunna använda nättelefonsvarearen bekvämt via nättelefonsvarearlistan och funktionen snabbval måste du registrera numret i telefonen.

► Meny ► Telefonsvareare ► OK ► Nättelesv. ► OK



Ange numret till nättelefonsvarearen tryck på OK.

Ta emot ett nytt meddelande från nättelefonsvarearen

När det inkommer ett meddelande till dig får du ett samtal från nättelefonsvarearen. På displayen visas numret till nättelefonsvarearen om du har beställt nummerpresentation. Om du svarar på samtalet spelas de nya meddelandena upp. Om du inte svarar sparas numret till nättelefonsvarearen i **listan med missade samtal** (→ s. 20).



Om du lägger till telefonsvarearnumret och beteckningen Nät-TS i telefonboken visas den beteckningen i samtalslistan på displayen.

Lyssna på meddelanden

Du kan ringa till nättelefonsvarearen på tre sätt.

- Ring upp nättelefonsvarearen via menyn **Telefonsvareare**:
► Meny ► Telefonsvareare ► OK ► Spela upp meddel. ► OK ► Nättelesv. ► OK
- Ring upp nättelefonsvarearen via nättelefonsvarearlistan:
► ► Nättelesv. (→ s. 21)


Listan visas på följande sätt:

00: Antalet nya meddelanden visas bara korrekt om nätoperatören överför den informationen.

****:** Det går inte att se antalet gamla meddelanden.

OK Tryck på displayknappen för att ringa nättelefonsvarearen.

- Snabbval av nättelefonsvareare: ► Tryck **länge** på knappen

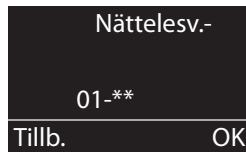

Ytterligare funktioner

ECO DECT

Med Gigaset gör du en insats för miljön.

Minska strömförbrukningen

Tack vare användning av en strömsnål kontakt uppgår energiförbrukningen hos telefonen till <0,5 W i viloläget och om batterierna inte laddas.

Minska strålningen

Strålningen minskas **automatiskt**:

- **Handenhet:** Ju närmare handenheten är basstationen desto lägre är strålningen.
- **Basstation:** Om bara en handenhet är registrerad och den står i basstationen minskas strålning till nära noll.

Du kan minska strålningen från handenheten och basstationen ytterligare genom att använda **Ekoläge**:





- **Ekoläge**
Reducerar alltid strålningen från handenhet och basstation med 80 % – oavsett om du telefonerar eller inte. Med **Ekoläge** minskar räckvidden med ca 50 %. Därför är **Ekoläge** alltid meningsfullt om det räcker med en mindre räckvidd.

Koppla från strålning




- **Ekoläge +**
När du aktiverar **Ekoläge +** är strålningen (DECT-sändeffekt) från basstation och handenhet frånkopplad i viloläge.
Det är också fallet om flera handenheter används såvida de har stöd för **Ekoläge +**.

Ekoläge/Ekoläge + kan aktiveras eller avaktiveras oberoende av varandra och fungerar även för flera handenheter. Handenheten behöver inte stå i basstationen.

Ekoläge / Ekoläge + aktivering/avaktivering:

- Meny ►  Inställningar ► OK ►  System ► OK ►  Ekoläge / Ekoläge + ► OK
( = på).

Statusindikatorer

Displaysymbol	Mottagningsstyrka
	– bra till dålig
 (rött)	– ingen mottagning
	Ekoläge + aktiverat (visas i viloläge istället för symbolen för mottagningsstyrka)

Använda handenheten som väckarklocka



- När **Ekoläge +** är aktiverat kan du kontrollera att basstationen kan nås genom att trycka på svaraknappen länge. Om det går att nå basstationen hör du en kopplingston.
- Vid aktiverat **Ekoläge +**:
 - Det tar ca 2 sekunder längre att upprätta ett samtal.
 - Standbytiden minskar med ca 50 %.
- Om du registrerar handenheter som saknar stöd för **Ekoläge +** avaktiveras funktionen i basstationen och alla handenheter.
- När **Ekoläge** är aktiverat minskar basstationens räckvidd.
- Ekoläge / Ekoläge +** och stöd för repeater (→ s. 41) kan inte användas samtidigt, alltså om du använder en repeater kan du inte använda **Ekoläge** och **Ekoläge +**.

Använda handenheten som väckarklocka

Aktivera/avaktivera väckarklocka




► Meny ► Väckarklocka ► OK ► Aktivering ► OK (= på)

Om du aktiverar väckarklockan öppnas automatiskt menyn för inställning av väckningstid.

Ställa in väckningstid

► Meny ► Väckarklocka ► OK ► Väcknings tid ► OK ► Ange väckningstid ► OK

Om väckarklockan är aktiverad visas symbolen och därefter väckningstiden.

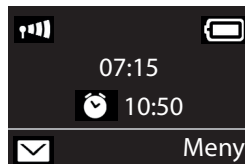

Väckningstiden visas bara på displayen om du har visat alla samtal i samtalslistorna.

Ställa in väckningssignal

► Meny ► Väckarklocka ► OK ► Signal ► OK ► (= på)

Stänga av väckningsalarm/upprepa efter paus (snooze-läge)

Förutsättning: Ett väckningsalarm ljuder.

- ▶ **Stänga av till nästa väckning:** Tryck på **Av**.

Eller:

- ▶ **Snooze-läge:**

Tryck på **Snooze** eller på valfri knapp. Väckningsalarmet stängs av och upprepas efter 5 minuter.

Eller:

Gör ingenting. Väckningsalarmet stängs av efter 60 sekunder och upprepas efter 5 minuter. Efter den fjärde upprepningen stängs väckningen av i 24 timmar.

Rumsövervakning

Om rumsövervakning är aktiverad rings det sparade (interna eller externa) numret upp så snart en definierad ljudnivå överskrids i närheten av handenheten.

I övervakningsläge indikeras inkommande samtal bara på displayen (**utan ringsignal**).

Displayens belysning minskas med 50 %. Servicetonerna är urkopplade.

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts övervakningsläget så länge samtalet varar. Funktionen **förblir** aktiverad. Övervakningsläget avaktiveras inte om handenheten stängs av eller sätts på igen.



Avståndet mellan handenheten och barnet bör vara 1 till 2 meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.

Den aktiverade funktionen minskar handenhetens drifttid. Placera därför handenheten i laddaren vid behov.

Övervakningen aktiveras först 20 sekunder efter att funktionen kopplats in.

På det telefonnummer som ska ringas upp måste telefonsvararen vara avaktiverad.

Efter aktiveringen bör du

- ▶ testa känsligheten
- ▶ testa anslutningen om larmet ska ledas till ett externt nummer.

Aktivera och ställa in rumsövervakning

- ▶ **Meny ▶ Babyvakt ▶ OK ▶ OK** = Rumsövervakning aktiverad


Om det redan finns ett måltelefonnummer är rumsövervakning aktiverad. På displayen visas **Babyvakt** : och det angivna målnumret.

Om ännu inget nummer har angetts:




Aktivera **Externt samtal**: ▶ **OK** ▶ Ange nummer ▶ **OK**

eller aktivera internt samtal:

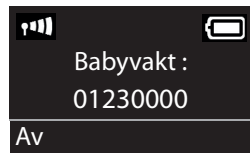- ▶ **Internt samtal** ▶ **OK** ... rumsövervakningen når alla registrerade handenheter



Ändra måltelefonnummer

- ▶ Meny ▶ Babyvakt ▶ OK ▶  Nummer att ▶ OK ▶  Externt samtal eller Internt samtal ▶ OK
- Vid Externt samtal: ▶  Ange måltelefonnummer ▶ OK

Avaktivera rumsövervakning/avbryta larm

Avaktivera rumsövervakningen:

- ▶ I viloläge trycker du på displayknappen **Av**.

Avbryta larmet: ▶ När larmet pågår trycker du på avslutaknappen 


Snabbuppringning

Du kan ställa in telefonen så att ett förvalt telefonnummer rings upp när du trycker på en **valfri** knapp. På så sätt kan t.ex. barn som ännu inte kan mata in telefonnummer, ringa ett visst nummer.

- ▶ Meny ▶  Snabbuppringn. ▶ OK ▶  Aktivering ▶ OK ( = på)


Om du aktiverar snabbuppringning öppnas automatiskt menyn för inmatning av måltelefonnumret.

- ▶ **Nummer att** : Mata in eller ändra det nummer som ska ringas upp ▶ **OK**


Den aktiverade snabbuppringningen visas på vilodisplayen. När du trycker på en valfri knapp rings det sparade numret upp. Tryck på avslutaknappen  för att avbryta uppringningen.

Avsluta snabbuppringningsläge

- ▶ Tryck på displayknappen **Av** ▶ Tryck länge på knappen .

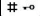eller: ▶ Tryck länge på 



Om du redan har allokerat SOS-funktionen till knappen  rings nödnumret upp även om snabbuppringning är aktiverat.

Ficklampa

Använd telefonen som ficklampa.

Aktivera/avaktivera ficklampsfunktionen

Aktivera: ▶ Meny ▶  Ficklampa ▶ OK ... Ficklampan tänds.

Avaktivera: ▶ Av (Efter 2 minuter avaktiveras funktionen automatiskt).



Funktionen avaktiveras automatiskt om SOS-funktionen används.

När lampan är aktiverad är alla funktioner spärrade, men SOS-funktionen fungerar.


Ficklampans LED kan även användas som optisk ringsignal vid inkommande samtal (→ s. 39).

Skydd mot oönskade samtal

Spärrlista

När spärrlistan är aktiverad indikeras inte samtal från nummer som ingår i den utan de visas bara på displayen. Inställningen gäller bara den handenhet där du gör inställningen.

Redigera spärrlista



▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Ljud/visuel. signaler ▶ OK ▶  Ringsignaler (handenhet) ▶ OK ▶ Blockeringslista ▶ OK ▶  Blockerade nummer ▶ OK

▶ Nytt ▶ Ange nummer ▶ OK

Eller:




▶ Radera ▶ Radera nummer ▶ OK

Aktivera spärrlista

▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Ljud/visuel. signaler ▶ OK ▶  Ringsignaler (handenhet) ▶ OK ▶ Blockeringslista ▶ OK ▶ Aktivering ▶ OK ( = Funktion aktiverad)

Tidsstyrning

Du kan ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa vid externa samtal, t.ex. på natten.




▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Ljud/visuel. signaler ▶ OK ▶  Ringsignaler (handenhet) ▶ OK ▶ Tidsstyrning ▶ OK

▶  Aktivering ▶ OK ( = aktiverad)

▶  Inställning. ▶ OK ▶ Starttid: /Sluttid: Ange tiden med fyra siffror och tryck på OK .

Anonyma samtal

Du kan ställa in att din handenhet inte ska ringa vid samtal utan nummerpresentation. Samtalet visas endast på displayen.

- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Ljud/visuel. signaler ▶ OK ▶  ▶ Ringsignaler (handenhet) ▶ OK ▶ Dämpa anonym ▶ OK = aktiverat

Använda flera handenheter

Registrera handenheter

Du kan registrera upp till fyra handenheter på basstationen.

Manuell registrering av Gigaset-handenheter

Du måste starta registreringen manuellt på handenheten (1) och basstationen (2).

När registreringen är klar övergår handenheten i viloläge.

Registreringsförloppet avbryts efter 60 sekunder. Gör om processen om registreringen inte slutfördes under den här tiden.

1) På handenheten

- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Registr. ▶ OK ▶  Registrera handenhet ▶ OK ▶ Ange systempinkod till basstationen (leveransinställning: 0000) ▶ OK

2) På basstationen

- ▶ Tryck inom 60 sekunder **länge** på registrerings-/sökknappen på basstationen (ca 3 sekunder).

Registrera andra handenheter

Du registrerar andra GAP-kompatibla enheter på följande sätt.

1) På handenheten

- ▶ Registrerar handenheter enligt respektive bruksanvisning.

2) På basstationen

- ▶ Tryck **länge** på registrerings-/sökknappen på basstationen (ca 3 sekunder).

Avregistrera handenheter

Du kan avregistrera samtliga registrerade Gigaset W570H-handenheter via alla registrerade handenheter.

- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Registr. ▶ OK ▶  Avregistr. handenhet ▶ OK



Välj den mobilenheten som ska avregistreras och tryck på **OK**.

(Den handenhet du just nu använder är markerad med .)



Ange aktuell systempinkod och tryck på **OK**.

OK


Tryck på displayknappen.

Söka handenhet ("sökning")

Du kan söka din handenhet med hjälp av basstationen.

- ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen
- ▶ Alla handenheter ringer samtidigt ("sökning") även om ringsignalerna är avaktiverade.

Avsluta sökning

- ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen  eller display-knappen **Av** på handenheten.

Ansluta till ett externt samtal


Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal.

Förutsättning: Funktionen **Medlyssning** är aktiverad.

Aktivera/avaktivera funktionen:


- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  Medlyssning ▶ OK ( = på)

Ansluta till samtalet:

- ▶ Tryck **länge** på svaraknappen  på handenheten. Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal. På handenhetens display står det **Konferens**.

Avsluta anslutning till samtal:

- ▶ Tryck på avslutaknappen  på handenheten. Alla deltagare hör en signal





Om den **första** interna anslutningen trycker på avslutaknappen  kvarstår förbindelsen mellan den andra handenheten och den externa samtalspartnern.

Ställa in telefonen

Ställa in handenheten

Du kan ändra inställningarna i handenheten individuellt.


Ställa in datum och tid

- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Datum/tid ▶ OK
- ▶ Ange dag, månad och år med  med åtta siffror, t.ex. för den 1 april 2019. ▶ OK
- ▶ ange timmar och minuter med  med fyra siffror, tex. för 07.15 ▶ OK

Ändra displayspråk

Du kan visa displaytexterna på olika språk.

- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Språk ▶ OK ▶  (Välj språk) ▶ OK

Aktuellt språk är markerat med .

Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:

- ▶  ▶ ▶  (Välj språk) ▶ OK

Ställa in stora siffror.

Du kan visa större siffror som är lättare att se när du ringer.

- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Stort tecken ▶ OK (= på).







När funktionen är avaktiverad visas i viloläget utöver klockslag även datum.

Ändra displaybelysning


Handenheten i laddaren:

- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Bakbelysning ▶ OK ▶ Med laddare ▶ OK (= på)

eller utanför laddaren:

- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Bakbelysning ▶ OK ▶  Utan laddare ▶ OK ▶ Tid i viloläge förkortas ▶ OK (= på).




Autosvar

När funktionen är aktiverad behöver du bara lyfta upp handenheten ur basstationen när det ringer, utan att du behöver trycka på svaraknappen .

► Meny ►  Inställningar ► OK ►  Telefoni ► OK ►  Auto. svar ► OK = på


Ändra samtalsvolymen

Du kan ställa in volymen för högtalare och lur i fem steg (1–5, t.ex. volym 3 = .

► Meny ►  Inställningar ► OK ►  Ljud/visuel. signaler ► OK ►  Samtalsvolym ► OK ►  Tfn.lursvolym / Handsfreevolym ► OK ►  Ställ in volymen ► OK

Ställa in volymen under ett samtal: → s. 18

Ändra ringsignal





- Ljudvolym: Fem volymsteg (1–5, t.ex. volym 3 = .
- Melodi: Lista med förinstallerade ringsignaler.

Ringsignalerna kan ställas in olika för följande funktioner:

- För ext. samtal
 - För interna samtal
-

Ställa in ringsignalsvolymen

Volymen är densamma för alla typer av signaler.






► Meny ►  Inställningar ► OK ►  Ljud/visuel. signaler ► OK ►  Ringsignaler (handenhet) ► OK ► Volym ► OK ►  Ställ in volymen ► OK

Ställa in ringmelodier






Ställ in olika ringmelodier för externa och interna samtal.

För externa samtal kan du dessutom bestämma om telefon inte ska ringa under bestämda tider eller vid anonyma samtal.

För interna samtal:

► Meny ►  Inställningar ► OK ►  Ljud/visuel. signaler ► OK ►  Ringsignaler (handenhet) ► OK ► Melodi ► OK ►  För interna samtal ► OK ►  (Välj melodi) ► OK = vald

För externa samtal:

► Meny ►  Inställningar ► OK ►  Ljud/visuel. signaler ► OK ►  Ringsignaler (handenhet) ► OK ► Melodi ► OK ►  För ext. samtal ► OK ►  (Välj melodi) ► OK = vald


Aktivera/avaktivera ringsignal

Du kan:

- stänga av ringsignal varaktigt i **viloläge** eller **för ett samtal innan du svarar**
- stänga av ringsignalen enbart för det **aktuella samtalet**.

Återinkoppling under ett samtal är inte möjlig.

Stänga av ringsignal varaktigt:

- ▶ Tryck på stjärnknappen  länge. ... På displayen visas symbolen .

Återinkoppling av ringsignal:




- ▶ Tryck på stjärnknappen  länge

Avaktivera ringsignalen för det aktuella samtalet:

- ▶ Tryck på displayknappen **Tyst**.

Aktivera/avaktivera optisk signal

Låt inkommande samtal aviseras optiskt (t.ex. i bullrig miljö).

- ▶ **Meny** ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Ljud/visuel. signaler** ▶ **OK** ▶  ▶ **LED-signal** ▶ **OK** = aktiverad)




Aviserings-/varningssignaler

I din handenhet indikeras olika aktiviteter och tillstånd med hjälp av ljudsignaler. Följande signaler kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra:




- **Servicetoner**
 - **Knappljud:** Varje knapptryck bekräftas.
 - **Bekräftelseton** (stigande tonföljd): I slutet av inmatning/inställning, när handenheten placeras i basstationen och när det kommer en ny post i samtalslistan.
 - **Felton** (sjunkande tonföljd): Vid felinmatningar.
- **Batterivarning**
Batteriet måste laddas.
- **Utan täckning**
Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd.

Bekräftelsetonen när du placerar handenheten i basstationen går inte att stänga av.


Aktivera/avaktivera aviseringssignaler

- ▶ **Meny** ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Ljud/visuel. signaler** ▶ **OK** ▶  **Servicetoner** ▶ **OK** = på)

Aktivera/avaktivera batterivarningssignal




- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Ljud/visuel. signaler ▶ OK ▶  Batterivarning ▶ OK = på

Aktivera/avaktivera varningssignal för räckvidd

- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Ljud/visuel. signaler ▶ OK ▶  Utan täckning ▶ OK = på

Ändra handenhetens namn

Vid registrering tilldelas handenheten automatiskt ett namn från basstationen. Du kan ändra det här namnet.

- ▶  ... Listan med registrerade handenheter visas ▶  Välj handenhet ▶ Name ▶  Ange ett namn ▶ OK

Återställa handenheten till fabriksinställning

Du kan återställa enskilda inställningar och ändringar. Poster i telefonboken och samtalslistan, datum och tid, nödnummer samt handenhetens registrering på basstationen påverkas inte.

- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Nollställ handenhet ▶ OK
- Avbryt återställningen med .

Ställa in basstation

Du ställer in basstationen med en registrerad handenhet.

Aktivera/avaktivera pausmusik

▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  Pausmusik ▶ OK = på

Stöd för repeater

Med en repeater kan du utöka räckvidden och mottagningsstyrkan hos din basstation. Repeater-drift måste då aktiveras. De samtal som just förs via basenheten kommer då att avbrytas.

Förutsättning: En repeater är registrerad.

▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Repeaterläge ▶ OK
= aktiverad)

När du har aktiverat eller avaktiverat repeatern måste du stänga av och sedan sätta på handenheten igen (→ s. 11).







- **Ekoläge / Ekoläge +** (→ s. 29) och repeater kan inte användas samtidigt, alltså om du använder en repeater kan du inte använda **Ekoläge** och **Ekoläge +**.
- Den krypterade överföringen som är aktiverad vid leveransen avaktiveras om en repeater aktiveras.

Skydd mot obehörig åtkomst

Säkra systeminställningarna på basstationen med en systempinkod som bara du känner till. Du måste bland annat ange systempinkoden när du registrerar och avregistrerar en handenhet på basstationen.

Ändra systempinkod

Du kan ändra den inställda systempinkoden (0000) mot en annan kod med fyra siffror som bara du känner till.

▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK ▶
 System-PIN: (Ange aktuell systempinkod) ▶ OK ▶ Ny PIN: (Ange ny systempinkod) ▶ OK

Återställa systempinkod

Om du skulle glömma systempinkoden kan du återställa basstationen till den ursprungliga koden **0000**:

Dra ut nätsladden från basstationen. Håll registrerings-/sökknappen på basstationen intryckt medan du sätter i nätkabeln i basstationen igen. Håll knappen nedtryckt i minst 5 sekunder.

Basstationen är nu återställd och systempinkoden inställd till **0000**.



Alla handenheter är avregistrerade och måste registreras på nytt. Alla inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Återställa basstationen till leveransläget

Vid återställning

- bibehålls datum och tid
 - förblir handenheter registrerade
 - stängs **Ekoläge** och **Ekoläge + av**,
 - återställs systempinkoden inte
- ▶ **Meny** ▶ **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Återställ basstation** ▶ **OK**

Använda basstationen i en telefonväxel

Följande inställningar är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel. Se telefonväxelns bruksanvisning.

Växla tillfälligt till tonval (MFV)

Om telefonväxeln använder pulsval (IWW) men tonval krävs för en anslutning (t.ex. för att lyssna av nättelefon svararen) måste du ställa om till tonval för att kunna ringa.

Företsättning: Ett samtal pågår eller du har ringt ett externt nummer.

- ▶ Tryck på stjärnknappen .

Tonval är aktiverat **endast för den här anslutningen**.

Ställa in flashtid

- ▶ **Meny** ▶ **#** **0** **5** **#** **1** **2** ▶ Ange siffror för flashtiden:
 0 = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms;
 6 = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ **OK**

Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan tryckningen på svaraknappen och överföringen av telefonnumret.

- ▶ **Meny** ▶ **#** **0** **5** **#** **1** **9** ▶ Ange siffror för den aktuella pauslängden:
 1 = 1 sekund; **2** = 3 sekunder; **3** = 7 sekunder ▶ **OK**

Ändra paus efter R-knapp

- ▶ **Meny** ▶ **#** **0** **5** **#** **1** **4** ▶ Ange siffror för den aktuella pauslängden:
 1 = 800 ms; **2** = 1 600 ms; **3** = 3 200 ms ▶ **OK**

Bilaga

Kundservice & assistans

Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice
www.gigaset.com/service.



Besök våra kundservicesidor

Här hittar du bland annat:

- Frågor och svar
- Kostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
- Kompatibilitetskontroller



Kontakta våra servicemedarbetare

Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?
 Vi står gärna till förfogande...

... online:

via vårt kontaktformulär på kundtjänstsidan

... per telefon:

Sverige +46 (0)8502 52347

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Ha dina köpehandlingar redo.

Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).


För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

Frågor och svar

Du hittar förslag på problemlösning på internet under www.gigaset.com/service

Dessutom finns felsökningshjälp i följande översikt.

Inget visas på displayen

- Handenheten är inte påslagen: ► Tryck **länge** på avslutaknappen 
- Batteriet är tomt: ► Ladda eller byt batteriet (→ s. 9)

Du hör bara den du pratar med i ena örat

- Håll handenheten närmare hörsystemet

Enheten laddas inte

- Handenheten står inte korrekt i laddaren: ► Placera handenheten korrekt

Enheten stänger av sig, trots att batteriet enligt indikeringen fortfarande är laddat till 2/3

- Kontakterna/batterierna är förorenade eller korroderade ► Rengör kontakter/batterier eller byt ut batterierna (→ s. 9)

Samtal avbryts eller avslutas

- Radiosignalerna försvagas av väggar, tak, isoleringar och liknande ► Placera inte basstationen bakom eller under metallföremål. Undvik att placera basstationen i källaren (→ s. 7)

Kundservice & assistans

Högtalarkvaliteten är dålig

- Smuts på handenheten (t.ex. smink, damm, järnspån ...) ► Rengör handenheten (→ s. 47)

Höga knackljud, bakgrundsljud, störningar, knaster, växlande ljudvolym

- Störningar från andra enheter (nätkontakter från faxar, datorer, skrivare, mobiltelefoner) ► Öka avståndet till andra enheter (minst en halv meter) (→ s. 7)

Det går inte att ringa och på displayen blinkar BASSTATION eller Ingen basstation

- Basstationens strömkabel är inte ansluten: ► Kontrollera basstationens nätkontakt (→ s. 7)

På displayen visas Inte möjligt!

- Det går inte att ringa externa samtal samtidigt som ett annat samtal pågår. ► Vänta tills det andra samtalet har avslutats (gäller inte när funktionen för intern anslutning har aktiverats).
- Ringa externa samtal samtidigt som ett meddelande spelas in på telefonsvararen. ► Vänta tills inspelningen på telefonsvararen har avslutats

Klockan har återställts till leveransläget

- Basstationen och handenheten stängdes av samtidigt ► Ställ in tiden på nytt (→ s. 10)

I samtalslistan är ingen tid angiven

- Datum och tid är inte inställda ► Ställ in datum och tid (→ s. 10)

Kan inte genomföra förfrågan, pendlig, konferens

- Dessa funktioner som kan genomföras på enheten måste erbjudas och aktiveras av nätleverantören. Hanteringen kan även skilja sig åt mellan nätoperatörer. ► Kontakta därför din operatör

Handenhetens ljudvolym är för låg (lurvolym)

- Volymen är på den lägsta inställningen
 - Ändra inställningen för lurvolym (→ s. 38)
 - Ändra handenhetsens läge mot örat

Ljudvolymen i högtalarläget är för låg

- Volymen är på den lägsta inställningen ► Ändra inställningen för högtalarvolym (→ s. 38)

Du hör en ton när du hanterar telefonen

- Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig ► Upprepa åtgärden. Kontrollera vad som visas på displayen och läs mer i bruksanvisningen
- Batterierna är urladdade ► Ladda batterierna (→ s. 9)
- Den angivna systempinkoden är felaktig ► Ange systempinkoden igen eller återställ den (→ s. 41)

Du hör en ton när du talar i telefon

- Batterierna är urladdade ► Ladda batterierna (→ s. 9)

Du har glömt systempinkoden

- Återställ systempinkoden till 0000 (→ s. 41)

Felton vid inmatning av systempinkod.

- Den angivna systempinkod är felaktig ► Ange systempinkoden igen eller återställ den (→ s. 41)

Enheten har kommit i kontakt med vätska

- Låt enheten torka. ► Kontakt med vätska (→ s. 47)

Det gick inte att ställa in SOS-funktionen

- Du har inte sparat några SOS-nummer ► Spara minst ett SOS-nummer (→ s. 26)
- SOS-funktionen är inte aktiverad ► Aktivera SOS-funktionen (→ s. 26)
- SOS-funktionen fungerar bara när enheten är direktansluten eller ansluten till en växel som inte kräver att du trycker R eller P för att komma ut på linjen ► SOS-funktion direktvalsknapp (→ s. 25)

Mottagaren av ett SOS-samtal svarar inte

- I vissa telefonväxlar skickas bekräftelsen av SOS-samtalet med knappen 5 inte vidare till den anslutna handenheten. SOS-funktionen är då inte möjlig eftersom det inte går att föra några samtal. ► Testa SOS-funktionen med varje angiven mottagare när den har ställts in.

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåttande att följa den information som finns i användarhandboken.
- Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Ansvarsfriskrivning

Handenhetens display består av bildpunkter (pixlar). Varje pixel består av tre subpixlar (röd, grön, blå). Det kan hända att en subpixel faller bort eller visar fel färg.

Garantin träder endast i kraft om gränsen för största antal pixelfel överskrids.

Beskrivning	max antal tillåtna pixelfel
Lysande sub-pixlar i färg	1
Mörka sub-pixlar	1
Totalt antal färgade och mörka sub-pixlar	1



Slitage som repor på display och hölje omfattas inte av garantin.



Gigaset W570 är en trådlös premiumtelefon med stora knappar som vidarekopplar samtal direkt till hörapparater från Widex (Widex A/S, Nymoellevvej 6, 3540 Lyngby, Danmark).

Vi ansvarar inte för hörapparater eller för skador som beror på användning av hörapparater. Kontakt återförsäljaren av hörapparaterna om du har frågor.

Upplysningar från tillverkaren

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här radioutrustningen av typen Gigaset W570 - Gigaset W570H uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten i denna EU-försäkring om överensstämmelse finns på följande adress:

www.gigaset.com/docs.

Försäkringen kan även finnas i filerna "Internationell försäkring om överensstämmelse" eller "EU-försäkring om överensstämmelse".

Kontrollera därför alla filerna.

Integritetspolicy

Vi på Gigaset tar skyddet av våra kunduppgifter på största allvar. Av just denna anledning säkerställer vi att alla våra produkter utvecklas enligt principen inbyggd integritet (Privacy by Design). Vi använder de insamlade uppgifterna för att göra våra produkter så bra som möjligt. Därvid säkerställer vi att dina uppgifter är skyddade och endast används i syfte att erbjuda dig en tjänst eller en produkt. Vi vet vilken väg dina uppgifter tar i företaget och säkerställer att det sker säkert, skyddat och i överensstämmelse med reglerna för skydd av personuppgifter.

Integritetspolicyen i sin helhet finns på följande adress:

www.gigaset.com/privacy-policy

Miljö

Vårt miljöansvar

Vi på Gigaset Communications GmbH tar ett socialt ansvar och engagerar oss för en bättre värld. I alla delar av vårt arbete - från produkt- och processplanering till produktion, distribution till avfallshantering - lägger vi största vikt vid att ta vårt ekologiska ansvar.

Du hittar mer information på www.gigaset.com om våra miljövänliga produkter och tillvägagångssätt.

System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshandteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2012/19/EU för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshandlingstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk.

Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på högljansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

Kontakt med vätska

Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 **Skilj samtliga kablar från enheten.**
- 2 **Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.**
- 3 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 4 Torka alla delar torra.
- 5 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 6 **Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.**

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

Tekniska data

Batterier

Handenhet

Teknik:	Nickelmetallhydrid (NiMH)
Storlek:	AAA (Micro, HR03)
Spänning:	1,2V
Kapacitet:	750 mAh

Enheten levereras med två godkända batterier.

Drifttid/laddningstid för handenheten

Telefonens drifttid beror på batterikapacitet, batteriernas ålder och användarens beteende. (Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)

Viloläge (timmar) *	320 */200 **
Samtalstid (timmar)	14
Drifttid vid 1,5 h samtal per dag (timmar)*	130 */100 **
Laddningstid i basstation (timmar)	9
Laddningstid i laddare (timmar)	7,5

***Ekoläge** avaktiverat, utan displaybelysning i viloläge

****Ekoläge** aktiverat, utan displaybelysning i viloläge

Effektförbrukning hos basstationen

I viloläge

- Handenheten i laddaren ca 0,70 W
 - Handenheten inte i laddaren ca 0,50 W
- Under samtal ca 0,70 W

Allmän teknisk information om DECT


DECT-standard	stöds
GAP-standard	stöds
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Radiofrekvensområde	1 880–1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex 10 ms ramlängd
Sändningspulsens upprepningsfrekvens	100 Hz
Sändningspulsens längd	370 µs
Kanalavstånd	1 728 kHz
Datahastighet	1 152 kbit/s
Modulering	GFSK

Talkodning	32 kbit/s
Sändningseffekt	10 mW medeleffekt per kanal 250 mW pulseffekt
Räckvidd	upp till 300 m utomhus (fri sikt), upp till 50 m inomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/50 Hz
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Uppringningsmetod	MFV (tonval)

Allmän teknisk information om WIDEX

	WidexLink™
Frekvens	10,6 MHz
Frekvensdeviation	± 200 kHz
Bandbredd	660 kHz (-15 dB)
Kanaler	Einzelkanal
Modulation	FSK
Strålad medelutgångseffekt	13 nW (~ -48.8 dBm)
Magnetisk fältstyrka	-15 dBµA/m @ 10 m
Användningstid	100% simplex
Ljudfördröjning	< 10ms

Stifttilldelning i telefonkontakten

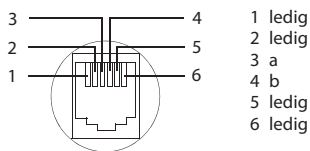

Teckentabell

Standardtecken

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 ∞	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	ä						
0	← ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* ↻	*	/	()	<	=	>	%							
# →	#	@	\	&	§										

1) blanksteg

Index

- A**
- Aktivera
 - autosvar. 38
 - aviseringssignaler. 39
 - handenhet 11
 - knapplös 11
 - sekretess 18
 - Anonyma samtal 34
 - Anonyma samtal av. 33
 - Ansluta till ett samtal 36
 - Ansvarsfriskrivning 45
 - Autosvar 16, 38
 - Avaktivera
 - autosvar. 38
 - aviseringssignaler. 39
 - knapplös 11
 - Avbrott
 - internetanslutning 6
 - LAN-anslutning 6
 - Avfallshantering 47
 - Aviseringssignaler 39
 - Avregistrera (handenhet) 35
 - Avslutaknapp. 2, 16
- B**
- Basstation
 - ansluta 7
 - använda i telefonväxel. 42
 - ställa in 41
 - systempinkod 41
 - ändra systempin. 41
 - återställa till fabriksinställningar 42
 - Batteri
 - ladda 9
 - sätta i 9
 - varningssignal 39
 - Bekräftelseton 39
 - Boost-knapp 2
 - Börja använda (handenhet) 9
- C**
- CLI, CLIP 17
 - CNIP 21
- D**
- Direktval
 - spara nummer 12
 - spara/ändra knappallokering 12
 - till telefonväxel 26
 - Direktvalsknapp A. 2
 - Direktvalsknappar B till D. 2
- E**
- Display
 - ställa in 37
 - trasig. 6
 - ändra displayspråk 9, 37
 - Display i viloläge. 15
 - Displayknappar 2, 13
- E**
- ECO DECT 29
 - Eco-Modus 29
 - Eco-Modus+ 29
 - Effektförbrukning. 48
 - Extra högt ljud-funktion 12
- F**
- Felinmatningar (korrigera) 15
 - Felton 39
 - Ficklampa (LED) 33
 - Fyrkantknappen. 2, 11
 - Förfrågan intern. 18
 - Förpackningens innehåll. 7
- G**
- Godkännande. 46
- H**
- Handenhet
 - använda flera. 35
 - aviseringssignaler. 39
 - avregistrera 35
 - börja använda 9
 - displayspråk. 9, 37
 - registrera 35
 - samtalsvolym 38
 - stor text 37
 - ställa in (individuell) 37
 - sätta på/stänga av. 11
 - söka 36
 - vidarekoppla samtal 18, 19
 - viloläge. 15
 - ändra namn 40
 - återställa till fabriksinställning. 40
 - Högtalare
 - knapp 2
 - Högtalarfunktion 17
 - Hörapparater 6
- I**
- Infoga flashtid 2
 - Integritetspolicy. 46

Index

Intern anslutning till samtal	36
Intern förfrågan	18
Internetanslutning	
avbrott	6
Internsamtal	18
Internt samtal	18
samtal väntar	19

K

Knapp 1 (snabbval nättelefon svararen)	2
Knappar	
avslutaknapp	2
boost-knapp	2
displayknappar	2, 13
fyrkantknapp	11
fyrkantknappen	2
högtalarknapp	2
knapp 1	2
knapp 1 (snabbval telefonsvarare)	28
meddelandeknapp	21
på/av-knapp	2
raderingsknapp	13
R-knapp	2
snabbval nättelefon svararen	2
snabbval telefonsvarare	28
stjärnknappen	2
styrknapp	2
svaraknapp	2
volyknapp	2
Knapplös	11
Knapptryckning	39
Kontakt med vätska	47
Kontakt, strömsnål	29
Korrigerade felinmatningar	15
Kortnummer se Direktval	
Kundservice	43
Kundservice & assistans	43

L

LAN-anslutning	
avbrott	6
Larm	
rumsövervakning	32
Lista	
missade samtal	20
samtalslista	19, 20
återuppringningslista	19
Lurläge	17
Lurvolym	38
Lyssna på	
meddelande (telefonsvarare)	28

M

Meddelande	
lyssna på	28
Meddelandeknapp	2
öppna listor	21
Medicinsk utrustning	6
Menystyrning	14

Miljö	46
Minska strömförbrukningen	29
Minska strålningen	29
Missat samtal	20
Mottagningsförstärkare, se repeater	

N

Nummer	
spara i telefonboken	22, 24
visa uppringande (CLIP)	17
Nummerpresentation	17
Nätadapter	6
Nättelefon svarare	28
Nödsamtal	
inte möjligt	6

O

Okänt	17
Okänt nummer	17

P

Pausmusik	41
Pinkod, ändra	41
Producentens garanti	45
På/av-knapp	2

R

Radera tecken	15
Raderingsknapp	13
Registrera (handenhet)	35
Repeater	41
Ringa	
besvara samtal	16
externt	16
internt	18
Ringa från telefonboken	23
Ringa tillbaka från samtalslistan	21
Ringa tillbaka till uppringande part	21
Ringsignal	
ställa in melodi	38
ställa in volym	38
stäng av för anonyma samtal	33
ändra	38
R-knapp	2
Rumsövervakning	31

S

Samtal	
ansluta deltagare	36
besvara	16
internt	18
vidarekoppla (överföra)	18, 19
Samtal väntar, internt samtal	19
Samtalslista	19, 20
Samtalsskydd	33
Samtals svar	38
Samtalsvolym	38
Sekretess, handenhet	18

Service	43
Skicka	
telefonbokspost till handenhet	24
Skriva och redigera text	15
Skydd mot samtal	33
Skydda telefonen mot åtkomst	41
Skötsel av enheten	47
Snabbuppringning	32
Snabbval	
telefonsvarare	28
Snooze-läge (väckarklocka)	31
Sortering i telefonboken	23
SOS-funktion	
aktivera/avaktivera	27
ställa in	26
Spärr	
aktivera/avaktivera knapplås	11
Spärrlista	33
St	30
Stifttilldelning	49
Stjärnknappen	2
Stor text	37
Strömsnål kontakt	29
Strålningsminskning	29
Styrknapp	2
Ställa in datum	10
Ställa in fabriksinställning	
basstation	42
handenhet	40
Ställa in flashtid	42
Ställa in melodi (ringsignal)	38
Ställa in nödsamtal	26
Ställa in tid	10
Ställa in volym	
högtalare	38
lur	38
ringsignal	38
språk handenhet	38
Stänga av	
handenhet	11
Svaraknapp	2
Svart lista, se spärrlista	
Symbol	
knapplås	11
ringsignal	39
Symboler	
visning av nya meddelanden	21
Systeminställningar	41
Säkerhetsanvisningar	6
Söka	
handenhet	36
i telefonboken	23
Sökning	36

T

Teckentabell	50
Tekniska data	48
Telefonbok	22
skicka post/lista till handenhet	24
sortering av poster	23
spara första numret	22
spara post	22
välja post	23
Telefona	
externt	16
Telefonkontakt, stifttilldelning	49
Telefonsamtal	
internt	18
Telefonväxel	
använda basstationen i en telefonväxel	42
ställa in flashtid	42
ställa in uppringningsmetod	42
växla till tonval	42
Tidsstyrning	39
Tonval	42
Trasig display	6

U

Upplysningar från tillverkaren	46
Uppringningsmetod	42

V

Varningssignal (batteri)	39
Varningssignal för räckvidd	40
Viloläge (display)	15
Viloläge, återgå till	15
Visa meddelande	
nättelefonsvararen	28
Visa nya meddelanden	21
Visning	
meddelande nättelefonsvarare	28
nummer (CLI/CLIP)	17
Visning av uppringande nummer, upplysningar .	17
Volym	
ringsignal	38
Volymknapp	2
Volymknappar	12
Väckarklocka	30
Vätska	47

W

Widex	
avaktivera parkoppling med telefon	1
parkoppla telefon och hörsystem	1
ändra volymen	1
Widex-hörsystem	1

Index

Ä		Ö	
Ändra		Översikt	
displayspråk	9	handenhet	2
systempinkod	41		
Ändra handenhetens namn	40		
Ändra pinkod		Å	
systempinkod	41	Återuppringning	19
Ändra systempinkod	41	Åtkomstskydd	41

Med ensamrätt. Ändringar förbehålles.

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com